

KMI-Häftremover Servetter

BRUKSANVISNING

Häftborttagning/ Plåsterborttagning

1. Befukta plåstret med en Häftremover servett
2. Vänta några sekunder
3. Dra därefter plåstret

Borttagning av limrester

1. Håll en Häftremover servett mot huden några sekunder
2. Ta därefter bort kvarstående limrester

Nagellacksborttagning

1. Håll en Häftremover servett mot den målade nageln ett par sekunder

2. Ta därefter bort nagellacket. Medlet smörjer samtidigt naglar och nagelband istället för att torka ut dem
3. Vid flera lager nagellack upprepa punkt 1-2
4. Nytt nagellack fastnar på nageln direkt efter användning av Häftremover servetten

Även för borttagning av limrester/etiketter på olika föremål eller utrustning

Undvik kontakt med vissa plaster och målade ytor
Häftremover servetter kan komposteras till 96%

Producent: KMI AB
+46 46 70 63 02